

Hinweise zum korrekten Setzen von Sinterfüßen in der Software Zirkonzahn.Nesting

Version: 09.05.2022 – Seite 1 von 4

Sinterfüße werden für Zirkonrestaurationen verwendet, um einen Verzug während des Sinterprozesses zu vermeiden.

1

Sinterfüße sollten ab einer Größe von mind. 3 Elementen erstellt werden.

2

Hinweise zum korrekten Setzen von Sinterfüßen in der Software Zirkonzahn.Nesting

Version: 09.05.2022 – Seite 2 von 4





